

EXTRA

SEDIE SENDISCALE
STAIRCHAIRS

MEBER+®

IN CASE OF EMERGENCY



1

EXTRA
ERGOLIFT

EXTRA
ERGOLIFT FX



Aprire la sedia premendo le levette di sblocco poste al di sotto della seduta.

Open the chair Squeeze together the two red levers under the seat to release the opening mechanism, gently drive the seat down till its complete opening.



Abbassare i braccioli poggia-braccio

Open the armrests




Abbassare la pedana poggia-piedi

Open the footrest



Aprire i cingoli Sbloccare il carrello cingolato agendo sulla leva posta in prossimità del pistoncino meccanico posteriore e abbassando fino a completa apertura.

Open the tracks Pull the lever to the right and move the track frame outward till its full extension.

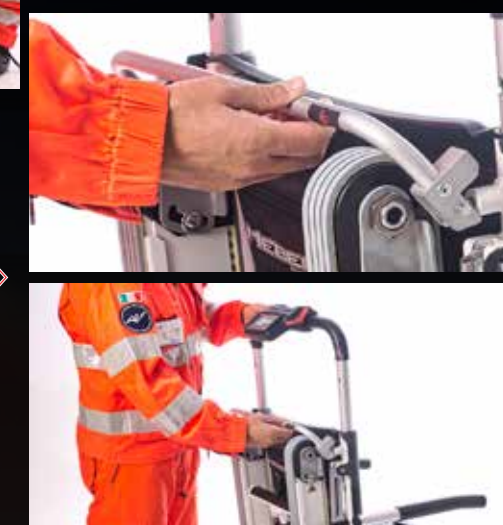

Aprire il maniglione premendo verso il basso la leva posizionata sotto la console.

Open the rear extendable handlebar Press down the lever positioned under the console and pull upward the handlebar.

Messa in opera
Getting started



Collegare la batteria al caricatore seguendo il verso delle frecce indicato in figura. Al termine di ogni utilizzo controllare sempre sullo schermo della console il livello di carica della batteria.

Insert the empty battery to the supplied battery charger. Check the main battery console charge status before and after each use.



Installazione batteria Applicare la batteria, precedentemente ricaricata, sulle apposite guide.

Setting up Insert the battery into the socket and firmly fix it by pressing it downward until when you hear a click.



Accensione centralina. Premere l'interruttore di accensione posto sul motore.

Turn on the electric engine. Switch on the green Power button located on the engine close to the battery.



Azionamento console. Accendere la console premendo qualsiasi tasto della maschera di interfaccia. Premere le leve a farfalla verso il basso o verso l'alto per movimentare i cingoli.

Turn on the console. Press any of the console buttons to turn it on. Press up or down the red levers to operate the tracks.



EXTRA
670/BR



Aprire la sedia premendo le levette di sblocco poste al di sotto della seduta.

Open the chair Squeeze together the two red levers under the seat to release the opening mechanism, gently drive the seat down till its complete opening.



Abbassare i braccioli poggia-braccio

Open the armrests




Abbassare la pedana poggia-piedi

Open the footrest



Aprire i cingoli Sbloccare il carrello cingolato agendo sulla leva posta in prossimità del pistoncino meccanico posteriore e abbassando fino a completa apertura.

Open the tracks Pull the lever to the right and move the track frame outward till its full extension.

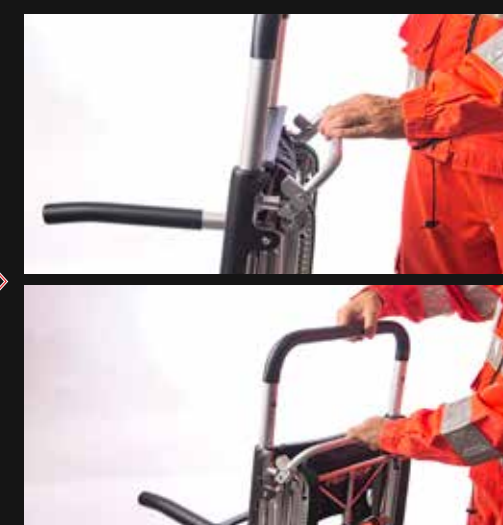

Aprire il maniglione premendo verso il basso la leva posizionata sotto la console.

Open the rear extendable handlebar Press down the lever positioned under the console and pull upward the handlebar.

2

Estensione leve
Lever extension

Si applica ai modelli:
Appliest to models:




Estensione leve telescopiche anteriori Impugnare le leve, ruotarle verso l'interno, estrarle fino a battuta e bloccarle ruotandole verso l'esterno.

Extend the frontal handles Turn the handles inward and pull off the bars till mid of full extension, then turn once more the handles outward to lock them in the choosen position.



Avvertenze
Warning

Si applica ai modelli:
Appliest to models:

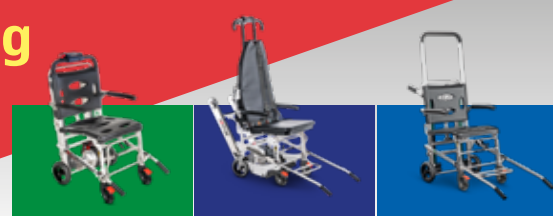

Ricordarsi di bloccare e/o sbloccare i freni delle ruote anteriori
Remember to lock and/or unlock the front brakes



Ricordarsi sempre di assicurare il paziente con le cinghie
Remember to always secure the patient with restraint belts

Sollevare le leve anteriori
Lift-up frontal levers



Premere il maniglione verso il basso
Press-down the rear handlebar

3

Chiusura e fissaggio
Close and store

Si applica ai modelli:
Appliest to models:



Premere le levette di sblocco poste al di sotto della seduta e chiudere la sedia su se stessa fino a fine corsa.

Squeeze together the two red levers under the seat to release the opening mechanism, lift the seat upward till its complete lock.



Sollevare il gancio tirando la maniglia verso l'alto, posizionare la sedia nell'area sottostante, riabbassare il gancio fissandolo sul maniglione posteriore

Pull up the fixing system and drive the chair wheels on their location, press down the handle on top of the handlebar chair to completely fix it.



Fissaggi certificati 10G
Certified 10G fixing systems

Art. 960
per/for
Extra 670/BR

Art. 975
per/for
Extra Ergolift

Visitate il nostro nuovo sito.
Visit our new website

www.meber.it